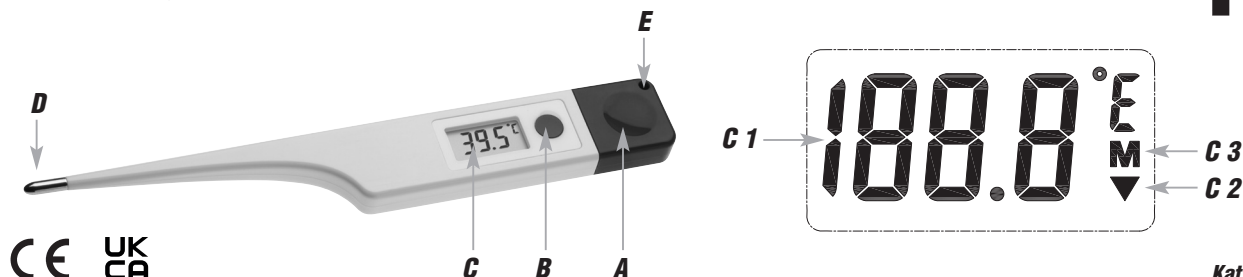


Bruksanvisning**TFA®**

CE UK CA

Kat. Nr. 15.2022

**VET 12
Digital veterinärtermometer**

(S)

1. Innan du använder den här produkten

- Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.
- Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att dessa instruktioner inte följs. På samma sätt tar vi inget ansvar för felaktiga avläsningar eller för eventuella konsekvenser som härrör från dem.
- Var särskilt uppmärksam på säkerhetsrådet!
- Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. För din säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för rektal mätning av djurens kroppstemperatur. Den ska endast användas enligt beskrivningen i dessa instruktioner.
- Kontrollera termometern för tecken på skador eller slitage före användning. Använd enheten endast när den är helt okej.
- Obehöriga reparationer, ändringar eller modifieringar av produkten är förbjudna.
- Drift i starka elektromagnetiska fält, till exempel bredvid en mobiltelefon, kan leda till funktionsfel.
- Diskutera alltid de bestämda värdena med din veterinär.



Varning!
Risk för skada:

- Instrumentet innehåller små delar som kan sväljas. Förvara den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn och djur.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsträffa inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas. **Explosionsrisk!**
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador orsakade av läckage.
- Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drabbade områdena med vatten och kontakta en läkare.



Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar. Böj inte instrumentet.

3. Delar och knappar

- A:** Batterifack
- B:** ON/OFF-knapp
- C:** Display
- C 1:** Temperaturvisning
- C 2:** Batterisymbol
- C 3:** Symbol mätminne
- D:** Temperature probe
- E:** Håll för fixering av sladd

4. Användning

- Desinficera spetsen före varje användning!
- Tryck på ON/OFF-knappen.
- När enheten är påslagen ljuder en signalton och alla segment visas kort.
- Den senast uppmätta temperaturen (M) visas inom kort på displayen. Instrumentet startar ett självtest, sedan visas 37 °C och Lo °C.
- Om rumstemperaturen är högre än 32 °C visas rumstemperaturen i stället för Lo °C. °C börjar blinka. Enheten är nu klar för användning.

**VET 12
Digital veterinärtermometer**

(S)

- Placera termometern på mätplatsen.
- Den faktiskt uppmätta maxtemperaturen visas permanent på displayen och °C blinkar.
- Om den maximala temperaturen förblir stabil så slutar °C att blinka och en larmton ljuder.
- Ta bort termometern. Tryck på ON /OFF-knappen för att stänga av enheten. Enheten stängs av automatiskt efter cirka 9 minuter.

5. Skötsel och underhåll

- Rengör instrumentet före och efter varje användning med en mjuk fuktig trasa. För desinfektion, använd vattenutspädd isopropylalkohol enligt tillverkarens anvisningar. Alla andra rengöringsämnen eller rengöringsmetoder kan orsaka dysfunktion eller skada på instrumentet. Sänk inte ner i vatten eller sterilisera med kokningsmetod, gas- eller ångautoklaver.
- Ta bort batteriet om du inte använder enheten under en längre tid.
- Förvara instrumentet i sitt fodral på en torr plats.

5.1 Byte av batteri

- Byt batteri när displayen börjar blekna eller batterisymbolen "▼" visas på displayen.
- Öppna batterifacket på baksidan med en lämplig skruvmejsel.
- Ta försiktigt bort batteriet med ett vasst föremål och sätt i ett nytt batteri LR 41 (+ pol upp). Se till att polariteten är korrekt.
- Stäng locket försiktigt och var särskilt uppmärksam på tätningeringen.

6. Felsökning

Problem	Lösning
Inget visas på skärmen	→ Slå på enheten → Se till att batteriet polaritet är korrekt (+pole upp) → Byt batteri
Felaktig indikation	→ Byt batteri → Kontrollera rätt position för termometern → Ta bort batteriet. Vänta en minut och sedan sätt tillbaka batteriet.

7. Avfallshantering

Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön.

Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de insamlingsystem som har upprättats.

**Kassering av den elektriska enheten**

Ta bort icke-permanent installerade batterier och uppladdningsbara batterier från enheten och kassera dem separat.

Denna produkt är märkt i enlighet med EU:s direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsavfall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänade enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning för att säkerställa miljökompatibelt bortskaffande. Retur tjänsten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

**Kassering av batterierna**

Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig kasseras med hushållsavfall. De innehåller föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga för miljön och människors hälsa om de bortskaffas på ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink, mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall.

**VET 12
Digital veterinärtermometer**

(S)

Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier för miljövänligt bortskaffande hos återförsäljare eller lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella eller lokala bestämmelser. Retur tjänsten är kostnadsfri. Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från din kommunfullmäktige eller kommun.

Namnen på de tungmetaller som ingår är:
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Minska genereringen av avfall från batterier genom att använda batterier med längre livslängd eller lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skrapa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller batteriinhållande elektriska och elektroniska apparater. Separat insamling och återvinning av batterier och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.



WARNING!
Skador på miljö och hälsa genom felaktig kassering av batterierna!

9. Specifikationer

Type	Maximal termometer
Mätområde Lo °C	32 °C ... 42.9 °C Omgivande temperatur är lägre än 32 °C
Hi °C	Surrounding temperature Omgivande temperatur 42.9 °C
Noggrannhet	±0,1 °C vid 35,0 °C...42 °C ±0,2 °C annars
Upplösning	0.1 °C
Mättid (rektal)	Approx. 10-20 seconds
Förvaringsförhållanden	Temperatur -10 °C...+40 °C Luftfuktighet 30...90 % rH
Omgivningsförhållanden vid användning	Temperatur 10 °C...35 °C Luftfuktighet 40...80 % rH
IP skyddsklass	IP67
Batteri	1 x LR 41 1,5 V (ingår)
Höjdesmätt	188 x 26 x 11 mm
Vikt	23 g

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Tyskland

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de skrivs ut och kan ändras utan föregående meddelande.
De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de
E-post: info@tfa-dostmann.de

09/22